

Băng gạc vô trùng không thấm nước

STERILE ADFLEX (WITH- PAD)

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng để bảo vệ vết thương hở, hậu phẫu thuật, các vết thương nông, tiết dịch ít như: vết thương bị trầy xước, rách da, bỏng nhẹ,...



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Băng film Polyurethane (P.U) trong suốt, mềm dẻo, mỏng, dễ dàng theo dõi vùng dán băng, không thấm nước, không chứa latex, thích hợp với mọi vị trí cơ thể.
- Màng film P.U thoáng khí, bán thấm, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, nhưng không cho vi khuẩn và nước đi qua (không thấm nước) giúp bảo vệ vùng dán băng khỏi tác động của môi trường, 4 góc bo tròn tránh bung mép.
- Gạc gồm viscose (rayon), polyester (PET) thấm hút dịch, mũ tốt giúp quá trình phục hồi vết thương được thuận lợi.
- Gạc phủ lớp chống dính polyethylene (HDPE) không dính vào vết thương, không gây đau khi thay/ tháo băng.
- Phủ keo acrylic độ dính tốt và an toàn cho mọi loại da.
- Giấy lót silicone bảo vệ keo để dễ dàng bóc ra khi sử dụng.
- Tiệt trùng từng miếng bằng Ethylene Oxide (E.O Gas).
- Đóng gói vô trùng riêng từng miếng, bao bì plastic chống thấm nước.

THÔNG SỐ

- Băng film Polyurethane (P.U) bán thấm
- Phủ keo Acrylic (ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate (40-50%); acetic acid ethyl ester (20-25%); 2-Propanol (15-20%)), định lượng 35g/m², trọng lượng riêng 0.900 ± 0.050, độ nhớt 1,500- 4,000 mPa.s.
- Mức thấm hơi nước (MVTR) ≥ 500g/m²/24h
- Độ dính 440g/12mm ± 30g (Lực dính 3.60 ± 0.25 N/cm)
- Độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 200g
- Gạc phủ màng polyethylene (HDPE), độ dày 0.1-0.15mm, định lượng 12-18g/m²
- Giấy lót phủ silicone, định lượng 80g/m², dày 0.07mm ± 10%, lực bóc 5-20 gf/25mm
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, TCCS 02:2023/YC.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch và khô vết thương, vùng da xung quanh trước khi dán sản phẩm.
- Chọn kích cỡ băng phù hợp với hình dáng, kích thước của vết thương, nên chọn phần gạc lớn hơn vết thương.
- Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo và gạc (phần có chữ 1 FIRST REMOVE), đặt băng vào trung tâm vết thương, vuốt nhẹ từ trong ra ngoài để dính chắc lên da, cuối cùng loại bỏ lớp màng PET phía trên (phần có chữ 2 SECOND REMOVE) bằng cách bóc theo đường ở giữa mũi tên ra hai bên và vuốt nhẹ.
- Thay băng gạc khi cần thiết, băng gạc chỉ sử dụng một lần.

| Mã sản phẩm | Kích cỡ băng | Kích cỡ gạc | Quy cách hộp |
|-------------|--------------|--------------|----------------|
| VAFW6070 | ≥ 6cm x 7cm | ≥ 3cm x 4cm | 50 miếng / hộp |
| VAFW6010 | ≥ 6cm x 10cm | ≥ 3cm x 5cm | 50 miếng / hộp |
| VAFW9010 | ≥ 9cm x 10cm | ≥ 5cm x 6cm | 50 miếng / hộp |
| VAFW9015 | ≥ 9cm x 15cm | ≥ 5cm x 10cm | 50 miếng / hộp |
| VAFW9020 | ≥ 9cm x 20cm | ≥ 5cm x 15cm | 50 miếng / hộp |
| VAFW9025 | ≥ 9cm x 25cm | ≥ 5cm x 20cm | 50 miếng / hộp |

