

# ACE BAND - F

## 에이스밴드- 에스

### Băng keo cá nhân vải



## ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu sợi vải đàn hồi (viscose 70%, polyamide 30%), mềm mại, co giãn tốt, có nhiều lỗ thoát nhỏ trên băng giúp da thoáng khí.
- Băng dính tốt trên da, độ dính cao trên mọi vị trí, phù hợp với nhiều vị trí trên cơ thể, kể cả vị trí khó.
- Phủ keo Acrylic 140-168mg không chứa latex, độ dính 520g/12mm  $\pm$  30g (Lực dính: 4.25  $\pm$  0.25 N/cm), độ bền kéo 14.5kg/12mm  $\pm$  500g an toàn cho mọi loại da.
- Gạc mềm mại, chất liệu vải không dệt, thấm hút tốt bằng sợi viscose, phủ lớp màng chống dính polyethylene (HDPE) độ dày 0.1-0.15mm, định lượng 12-18g/m<sup>2</sup>, ngăn giữa gạc và vết thương, không dính vào vết thương, thay băng dễ dàng và không đau.
- Tẩm benzalkonium chloride trên gạc có hiệu quả khử mùi và hỗ trợ kháng khuẩn.
- Giấy lót silicone bảo vệ keo dày 0.06  $\pm$  10%, lực bóc 5-20gf/25mm.
- Có kiểm tra vi sinh phù hợp với giới hạn quy định tại Dược điển Việt Nam V.
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 07:2016/YC.

## CHỈ ĐỊNH

Sử dụng để bảo vệ vết thương hở nhỏ, vết cắt, bị trầy xước, ...



## CÁCH SỬ DỤNG

- \* Làm sạch, lau khô vết thương và vùng da xung quanh trước khi dán sản phẩm.
- \* Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo của băng, dán trực tiếp lên vết thương.
- \* Vuốt cẩn thận các cạnh giúp băng dính chắc.
- \* Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

Mã sản phẩm	Kích thước	Quy cách
VBS100-F	$\geq 72\text{mm} \times 18\text{mm}$ (Gạc $\geq 20\text{mm} \times 10\text{mm}$ )	100 miếng/ hộp
VBS100-FS	$\geq 60\text{mm} \times 19\text{mm}$ (Gạc $\geq 20\text{mm} \times 10\text{mm}$ )	

