

# YOUNG PLASTER - SILK

## 영반창고-실크 Băng keo cuộn lụa Young Plaster-Silk

YOUNG CHEMICAL VINA




### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vải lụa trắng Acetate Taffeta (định lượng 63-69g/m<sup>2</sup>, mật độ sợi 43x19/cm, mật độ sợi ngang 159-173 dtex, mật độ sợi dọc 80-88 dtex), độ bền kéo theo chiều ngang 5.0kg/12mm ± 500g, độ bền kéo theo chiều dọc ≥ 34N/cm, độ giãn dài ≤ 30%, thoáng khí, bền chắc, không chứa latex, phần nền bằng vải lụa nhẹ nhàng và mềm mại.
- Phủ keo Acrylic, trọng lượng 60g poly acrylic/m<sup>2</sup>, không chứa latex, không dùng dung môi, độ dính tốt và an toàn cho mọi loại da.
- Độ dính 540g/12mm ± 30g (Lực dính 4.2- 4.7N/cm)
- Băng quấn vào lõi nhựa xanh liền cánh để bảo vệ, có bờ răng cưa hai bên, dễ bóc theo 2 chiều ngang dọc, không sót keo trên da khi tháo băng.
- Có kiểm tra vi sinh phù hợp với giới hạn quy định tại Dược điển Việt Nam V.
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 03:2014/YC.

### CHỈ ĐỊNH

Sử dụng để cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim lùn,... hoặc dán lên băng gạc bảo vệ vết thương.

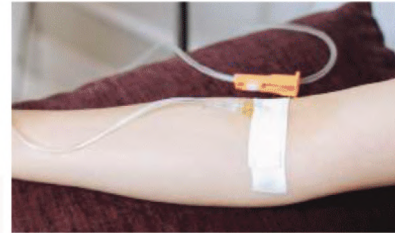

### CÁCH SỬ DỤNG

- ✓ Làm sạch và khô vùng da trước khi dán sản phẩm.
- ✓ Tháo bỏ lớp giấy bảo vệ keo của băng, dán trực tiếp lên băng, gạc hoặc vị trí cần cố định, không dán trực tiếp lên vết thương.
- ✓ Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

Mã sản phẩm	Kích thước	Quy cách
VPS125B	≥ 1.25cm x 5m	
VPS250B	≥ 2.5cm x 5m	1 cuộn/ hộp
VPS500B	≥ 5cm x 5m	6 cuộn/ hộp
VPS125D	≥ 1.25cm x 9.1m	12 cuộn/ hộp
VPS250D	≥ 2.5cm x 9.1m	24 cuộn/ hộp
VPS500D	≥ 5cm x 9.1m	



YOUNG CHEMICAL VINA

Lô R-4 và R-4A Đường Tân Tập Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

K-Medical  
YOUR HEALTH • OUR PROMISE

CÔNG TY TNHH K-MEDICAL

Địa chỉ: 55 Trần Quốc Hoàn, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM  
Tel: 028 7300 6640