

YOUNG CREPE - BĂNG THUN CÓ KEO CỐ ĐỊNH



CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ phòng ngừa và phục hồi các tổn thương khớp, xương, gân cơ và dây chằng, sử dụng sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình giúp phục hồi chấn thương hoặc sử dụng cố định băng gạc.

THÔNG SỐ

- Băng thun (cotton 100%), co giãn $\geq 90\%$, màu trắng (Số sợi ngang/10cm: 160 ± 5 , số sợi dọc/10cm: 74 ± 2 , định lượng $\geq 140\text{g/m}^2$, độ dày $0.89\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$)
- Keo zinc oxide (oxide kẽm) không dùng dung môi (định lượng khối phủ $100\text{-}130\text{g/m}^2$)
- Độ bền kéo $10\text{kg}/12\text{mm} \pm 0.5\text{kg}$, độ kết dính $600\text{g}/12\text{mm} \pm 50\text{g}$
- Lực dính 2-9 N/cm
- Giấy lót silicone định lượng 80g/m^2 , lực bóc 5-20gf/25mm.
- Có kiểm tra vi sinh phù hợp với giới hạn quy định tại Dược điển Việt Nam V.
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, TCCS 03:2023/YC.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Băng có nhiều lỗ thoát khí nhỏ để thoát hơi nước, giúp thông thoáng và tránh làm hầm da.
- Phủ keo zinc oxide, chất kết dính có độ dính cao, an toàn cho da, băng keo đảm bảo dính chặt, không bị bong sau khi băng ép.
- Bờ răng cưa hai bên giúp không làm cản trở tuần hoàn.
- Băng thun co giãn có keo cố định khớp, dùng băng ép, phòng ngừa và phục hồi tổn thương, cử động không bị hạn chế, hoặc sử dụng cố định băng gạc, dễ dàng sử dụng trên nhiều vị trí cơ thể. Ứng dụng phục hồi chức năng trong chấn thương thể thao.
- Có đường kẻ giữa băng giúp quấn băng chính xác và dễ dàng, băng cuộn vào lõi giấy cứng, bảo vệ trong lớp phim.
- Giấy lót silicone bảo vệ keo để thao tác khi sử dụng.
- Đóng gói riêng lẻ từng cuộn.

Mã sản phẩm	Kích cỡ băng	Quy cách
YCRE6045	$\geq 6\text{cm} \times 4.5\text{m}$ (đã kéo giãn)	1 cuộn/hộp
YCRE8045	$\geq 8\text{cm} \times 4.5\text{m}$ (đã kéo giãn)	1 cuộn/hộp
YCRE1045	$\geq 10\text{cm} \times 4.5\text{m}$ (đã kéo giãn)	1 cuộn/hộp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch và khô vùng da xung quanh vị trí cần cố định/ bảo vệ trước khi dán sản phẩm.
- Cắt chiều dài dải băng theo kích thước mong muốn, bóc lớp giấy lót bảo vệ ở một đầu dán lên vị trí cần thiết, vừa dán băng vừa tiếp tục bóc lớp giấy lót, kéo căng dải băng theo mức độ khác nhau tùy theo mục đích sử dụng/ hiệu quả mong muốn.
- Củng cố lực hỗ trợ bằng cách quấn thêm một đến 2 vòng, lưu ý dán chồng lên ít nhất nửa lớp băng đầu tiên.
- Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

