

YOUNG CREPE - BĂNG THUN CÓ KEO CO GIÃN



CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ phòng ngừa và phục hồi các tổn thương khớp, xương, gân cơ và dây chằng, sử dụng sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình giúp phục hồi chấn thương hoặc sử dụng cố định băng gạc.

THÔNG SỐ

- Băng thun (cotton 100%), co giãn, màu trắng (Số sợi ngang/10cm: 160 ± 5 , số sợi dọc/10cm: 74 ± 2 , trọng lượng $\geq 140\text{g/m}^2$)
- Keo zinc oxide (oxide kẽm) không dùng dung môi (trọng lượng khối phủ $100\text{-}130\text{g/m}^2$)
- Độ bền kéo $10\text{kg}/12\text{mm} \pm 0.5\text{kg}$, độ bám dính $600\text{g}/12\text{mm} \pm 50\text{g}$
- Có kiểm tra vi sinh
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, TCCS 03:2023/YC.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Băng có nhiều lỗ thoát khí nhỏ để thoát hơi nước, giúp thông thoáng và tránh làm hầm da.
- Chất kết dính an toàn cho da.
- Bờ răng cưa không làm cản trở tuần hoàn.
- Băng thun có keo cố định khớp, co giãn dùng băng ép, phòng ngừa và phục hồi tổn thương, dễ dàng sử dụng trên nhiều vị trí cơ thể, cử động không bị hạn chế, cố định băng gạc.
- Có đường kẻ giữa băng giúp quấn băng chính xác và dễ dàng
- Giấy lót bảo vệ keo dễ thao tác khi sử dụng.

| Mã sản phẩm | Kích cỡ băng | Quy cách hộp |
|-------------|---------------------------|--------------|
| YCRE 6045 | 6cm x 4.5m (đã kéo giãn) | 1 cuộn/hộp |
| YCRE 8045 | 8cm x 4.5m (đã kéo giãn) | 1 cuộn/hộp |
| YCRE 1045 | 10cm x 4.5m (đã kéo giãn) | 1 cuộn/hộp |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch và khô vùng da xung quanh vị trí cần cố định/ bảo vệ trước khi dán sản phẩm.
- Cắt chiều dài dải băng theo kích thước mong muốn, bóc lớp giấy lót bảo vệ ở một đầu dán lên vị trí cần thiết, vừa dán băng vừa tiếp tục bóc lớp giấy lót, kéo căng dải băng theo mức độ khác nhau tùy theo mục đích sử dụng/ hiệu quả mong muốn.
- Củng cố lực hỗ trợ bằng cách quấn thêm một đến 2 vòng, lưu ý dán chồng lên ít nhất nửa lớp băng đầu tiên.
- Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.