


Băng vô trùng không thấm nước

STERILE ADFLEX (NON- PAD)

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng để cố định băng gạc, ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn,... hoặc bảo vệ vết khâu

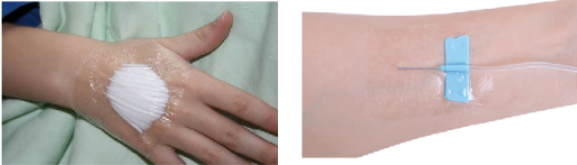

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Băng film Polyurethane (P.U) trong suốt, bán thấm, mỏng, dễ dàng theo dõi vùng dán băng, không thấm nước, không chứa latex, thích hợp với mọi vị trí cơ thể.
- Màng film P.U thoáng khí, bán thấm, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, nhưng không cho vi khuẩn và nước đi qua (không thấm nước) giúp bảo vệ vết thương/ vùng dán băng khỏi tác động của môi trường, 4 góc bo tròn tránh bung mép.
- Keo Acrylic độ dính tốt và an toàn cho mọi loại da.
- Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da,...
- Sử dụng làm miếng dán mi mắt dùng trong phẫu thuật phaco.
- Tiệt trùng từng miếng bằng Ethylene Oxide (E.O Gas).
- Đóng gói vô trùng riêng từng miếng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch và khô vùng da xung quanh vị trí cần cố định/ bảo vệ trước khi dán sản phẩm.
- Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo (phần có chữ 1 FIRST REMOVE), đặt băng vào vị trí cần cố định/ bảo vệ, vuốt nhẹ từ trong ra ngoài để dính chắc lên da, cuối cùng loại bỏ lớp màng PET phía trên (phần có chữ 2 SECOND REMOVE) bằng cách bóc theo đường ở giữa hướng mũi tên ra hai bên và vuốt nhẹ.
- Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.



THÔNG SỐ

- Băng film Polyurethane (P.U) trong suốt
- Phủ keo Acrylic
- Độ dính 440g/12mm ± 30g, độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 200g
- Giấy lót phủ Silicon
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, TCCS 01:2023/YC.

Mã sản phẩm	Kích cỡ băng	Quy cách hộp
VAF6070	6cm x 7cm	100 miếng/ hộp
VAF6010	6cm x 10cm	50 miếng/ hộp
VAF9010	9cm x 10cm	50 miếng/ hộp
VAF9015	9cm x 15cm	50 miếng/ hộp
VAF9020	9cm x 20cm	50 miếng/ hộp
VAF9025	9cm x 25cm	50 miếng/ hộp
VAF9030	9cm x 30cm	50 miếng/ hộp

