

Băng gạc vô trùng không thấm nước

STERILE ADFLEX (WITH- PAD)

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng để bảo vệ vết thương hở, hậu phẫu thuật, các vết thương nông, tiết dịch ít như: vết thương bị trầy xước, rách da, bỏng nhẹ,...



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Băng film Polyurethane (P.U) trong suốt, không chứa latex, mỏng, không thấm nước, dễ dàng theo dõi vùng dán băng, thích hợp với mọi vị trí cơ thể.
- Màng film P.U thoáng khí, bán thấm, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, nhưng không cho vi khuẩn và nước đi qua (không thấm nước) giúp bảo vệ vết thương khỏi tác động của môi trường, 4 góc bo tròn tránh bung mép.
- Gạc (Rayon 80% + PET 20%) thấm hút dịch, mủ tốt giúp quá trình phục hồi vết thương được thuận lợi.
- Gạc phủ màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương, không gây đau khi thay/ tháo băng.
- Phủ keo acrylic độ dính tốt và an toàn cho mọi loại da.
- Tiệt trùng từng miếng bằng E.O Gas (Ethylene Oxide).
- Đóng gói vô trùng riêng từng miếng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch và khô vết thương, vùng da xung quanh trước khi dán sản phẩm.
- Chọn kích cỡ băng phù hợp với hình dáng, kích thước của vết thương, nên chọn phần gạc lớn hơn vết thương.
- Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo và gạc (phần có chữ 1 FIRST REMOVE), đặt băng vào trung tâm vết thương, vuốt nhẹ từ trong ra ngoài để dính chắc lên da, cuối cùng loại bỏ lớp màng PET phía trên (phần có chữ 2 SECOND REMOVE) bằng cách bóc theo đường ở giữa mũi tên ra hai bên và vuốt nhẹ.
- Thay băng gạc khi cần thiết, băng gạc chỉ sử dụng một lần.



THÔNG SỐ

- Băng Polyurethane (P.U) trong suốt, bán thấm
- Phủ keo Acrylic độ dính 440g/12mm $\pm$ 30g,
- Độ bền kéo 2.0kg/12mm $\pm$ 200g
- Gạc phủ màng polyethylene
- Giấy lót phủ silicone
- Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận: ISO 13485, FDA, TCCS 02:2023/YC.

Mã sản phẩm	Kích cỡ băng	Kích cỡ gạc	Quy cách hộp
VAFW6070	6cm x 7cm	3cm x 4cm	50 miếng/hộp
VAFW6010	6cm x 10cm	3cm x 5cm	50 miếng/hộp
VAFW9010	9cm x 10cm	5cm x 6cm	50 miếng/hộp
VAFW9015	9cm x 15cm	5cm x 10cm	50 miếng/hộp
VAFW9020	9cm x 20cm	5cm x 15cm	50 miếng/hộp
VAFW9025	9cm x 25cm	5cm x 20cm	50 miếng/hộp
VAFW9030	9cm x 30cm	5cm x 25cm	50 miếng/hộp

